

Rekovel® Yeniden Kullanılabilir Enjeksiyon Kalem

Hasta Kullanım Kılavuzu

Rekovel® kalem yalnızca sağlık uzmanınız tarafından eğitim verildikten sonra kullanılmalıdır. Bu broşür, Rekovel® kalemin doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını gösterdikten sonra yararlı bir hatırlatıcı olarak işlev görür, bu nedenle enjeksiyonlarınızı yaparken elinizin altında olmasını isteyebilirsiniz. Talimat videosu için www.rekovel.nl/videos adresini ziyaret ediniz. Bir AB numarasını doldurmanız gerekiyorsa, numarayı Rekovel® ambalajınızın arkasında bulacaksınız.

Rekovel® kalem ile birlikte sunulan Kullanım Talimatlarını ve Rekovel® kartuşları ile birlikte sunulan ambalaj broşürünü okumanız gerekmektedir.

Rekovel® kaleminizin kullanımı ile ilgili şüpheleriniz veya sorularınız varsa sağlık uzmanınıza başvurduğunuzdan emin olun.



Rekovel® kaleminizi oluşturan tüm bileşenler şunlardır.


Kalem Bileşenleri

- A. Kalem kapağı
- B. Kılavuz vidası
- C. Gri bilezik
- D. Kilitleme/Kilit Açma sembolleri
- E. Doz uygulama sürgüsü
- F. Kalem gövdesi
- G. Doz penceresi
- H. Doz selektörü
- I. Doz düzeltme düğmesi
- J. Kartuş yuvası

Kartuş Bileşenleri

- K. Dış koruyucu iğne kapağı*
- L. İç iğne kapağı*
- M. Kalem iğnesi*
- N. Kartuş*
- O. Kartuş pistonu*

* Rekovel® kalem ile birlikte verilmez, ancak Rekovel® ilaç ile birlikte verilir.

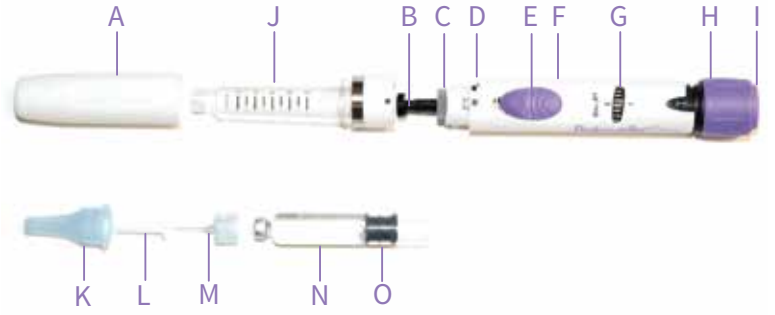

Kalemizinle Rekovel® Enjeksiyonu



1. Kaleminizi kullanmadan önce ellerinizi temizleyin ve temiz bir havluyla kurulayın. Kalemin kapağını çekin ve kartuş tutucuyu çevirerek ve kalem gövdesinden çekerek çıkarın.



2. Doz penceresinde '0' yazıp yazmadığını kontrol edin. Yazmaması halinde doz düzeltici düğmeyi kullanarak '0'a getirin (yardım için 12. adıma bakın).



3. Gri bileziği sonuna kadar döndürerek kılavuz vidasını uzatın.

Kartuşun yüklenmesi



4. Metalkapak önce girecek şekilde kartuşu boş kartuş yuvasının içerisine yerleştirin.



5. Uzatılan kılavuz vidasının ucunu kartuşun pistonuna doğru yerleştirin ve kartuş yuvasının üzerindeki noktayı kalem gövdesindeki 'açık kilit' simgesiyle hizalayın. Her ikisini birlikte sıkıca bastırın ve kartuş yuvasını döndürün. Nokta ile 'kilit kapalı' simgesinin hizalandığından emin olun.



6. Devam etmeden önce hareket vidası ve kartuş pistonu arasında boşluk olmadığını kontrol edin.

Yeni bir kartuş yükledikten sonra Rekovelle® kalemin hazırlanması



7. Kalem iğnesini kartuş tutucu üzerine sabitleyin. İğne üzerindeki koruyucu kapakları çıkarın. Dış kapağı atmayın – Daha sonra ihtiyacınız olacak.



8. Unutmayın, yeni bir kartuş yükledikten sonra kartuşta olabilecek hava kabarcığını çıkarmak için Rekovelle® kalemi bir kere hazırlamalısınız.

Doz selektörünü damla simgesine kadar çevirin.



9. Rekovelle® kalemi iğne yukarıya bakacak şekilde tutun ve sıkışan havayı hareket ettirmek için kartuş tutucuya hafifçe vurun.



10. Rekovelle® kalemin yan tarafında bulunan doz uygulama sürgüsünü doz penceresindeki sayılar '0' olana ve iğne ucunda bir damla görülene kadar iğneye doğru itin ve tutun.

Damla görünmezse bir damla görünene kadar 8'den 10'a kadar adımları tekrarlayın.

Dozun ayarlanması ve enjeksiyonun yapılması



11. Dozu seçmek için, doz penceresinin '0' gösterdiğinden emin olun, sonra sağlık uzmanınızın reçete ettiği doza çevirin. Doğru doza çevirmek konusunda şüpheleriniz varsa sağlık uzmanınız ile konuşun.



12. Dozu yanlışlıkla fazla çevirmeniz halinde, doz selektörünün üst kısmında bulunan doz düzeltici düğmeye basarak kolayca düzeltilebilir. Her basış dozu 2 tık düşürecektir. Çok fazla basmanız halinde, tekrar gereken doza çevirin.



13. Dozunuzu enjekte etmek için enjeksiyon alanının temiz olduğundan emin olun. Temiz cildinizin küçük bir bölgesini işaret ve baş parmağınızla sıkıştırın ve sağlık uzmanınız tarafından önerilen enjeksiyon yöntemini kullanarak kalem iğnesini batırın. Doz uygulama sürgüsünü kalem iğnesine doğru itin ve sabit tutun. Doz selektörü enjeksiyon sırasında dönecektir. Doz selektörünün dönmemesi ve doz penceresinde '0' gözükmesi halinde, doz uygulama sürgüsünü bırakın ve 10 saniye bekleyin. 10 saniye sonra kalem iğnesini çıkarabilirsiniz. Doz penceresinde '0' yazmalıdır.

14. Kalem iğnesini, kalemi kartuş muhafazasında tutarken dikkatli bir şekilde dış koruyucu iğne kapağını tekrar kapatarak ve kalem iğnesini gevşeterek çıkarın. Kalem kapağını Rekovelle® kalem üzerine tekrar yerleştirin. İğneyi çıkardığınızda iğnenin arka kısmını kendinize batırmamak için dikkatli olun. Kullanılmış kalem iğnesini dikkatli bir şekilde sağlık uzmanınız tarafından tavsiye edildiği şekilde atın. Lütfen iğnenin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini unutmayın.

Doz penceresinin '0' göstermemesi halinde Kartuşun değiştirilmesi



Enjeksiyonun sonunda doz penceresinin '0' göstermemesi kartuşun boş olduğu ve sizin tam doz almadığınız anlamına gelir.

Bu durumda **pencerde görünen sayıyı not edin.**

Bu eksik kalan dozdur. Şimdi 15'ten 17'ye kadar olan adımları takip edin.



15. Dozun tam olarak uygulanması halinde dozu tamamlamak için kartuşu değiştirmeniz gerekmektedir. Kalem iğnesi çıkarılmış halde, kartuş yuvasını kilit açma simgesine doğru döndürerek ve çekerek kalem gövdesinden çıkarın.



16. Boş kartuşu çıkarın ve sağlık uzmanınızın tavsiyesine uygun olarak imha edin.

17. Enjeksiyonunuzu tamamlamak için kalan dozu seçtiğinizden emin olarak 2'den 11'e kadar olan adımları tekrarlayın.